

Empfohlene Drehmomente

Produkt	Drehmoment (Ncm)	Drehmoment (Ncm)		
		X-Schmal 3.0 S	Schmal 3.5 S/4.0 S	Breit 4.5/5.0/5.0 S
Verschlusschraube		● manuell*	● manuell*	● manuell*
Gingivaformer Gingivaformer Uni Einheilkappe		● manuell*	● manuell*	● manuell*
TempDesign™ Provisorisches Abutment		● –	● 15	● 15
UniAbutment 20°/45° Cresco™ Insert 20°/45° für das Astra Tech Implantat-System™		● –	● 15	● 15
Brückenschraube Cresco™ Brückenschraube		● –	● 15	● 15
Atlantis™ Abutment für das Astra Tech Implantat-System™ ZirDesign™ TiDesign™ Profile BiAbutment CastDesign™ Abgewinkeltes Abutment		● 15**	● 20	● 25
Direct Abutment™ Kugelpopfanker Locator™ Abutment		● –	● 25	● 25

* Leichte Fingerkraft (5–10 Ncm). Verwenden Sie bitte den Sechskant-Schraubendreher und nicht den Drehmomentschlüssel/die Ratsche.

** Für das 3.0 S Implantat stehen ausschließlich das TiDesign™ sowie das Atlantis™ Abutment Titan und GoldHue™ zur Verfügung.